

Quick Guide - secMAC+

Én knap

Tænd skopet

secMAC+ tændes ved at trykke på knappen i 3 sek. Der aktiveres lys rundt om knappen og på displayet vises "secMAC+." Videolaryngoskopet er nu klar til brug.

Tag et billede

Tryk en gang på knappen og der bliver taget et billede. Dette indikeres ved et kameraikon øverst i venstre hjørne af displayet. Billedet gemmes automatisk i videolaryngoskopets interne hukommelse.

Optag en videosekvens

Dobbeltryk på knappen og videooptagelse starter. Dette vises med en rød optagerindikator, der blinker, i venstre top af displayet, ved siden af batteriindikatoren.

Når optagelsen ønskes afsluttet, trykker man blot en gang på knappen, og videosekvensen gemmes automatisk.

Sluk skopet

Tryk knappen ned i 3 sek., og på displayet vises et "secMAC+" billede, før det lukker helt ned. secMAC+ er nu slukket.

Batteri

Indikator på displayet

Batteristatus vises i øverste venstre hjørne med tre små hvide bjælker. Tre bjælker indikerer et fuldt opladt batteri med drifttid på 4 timer. Når sidste hvide bjælke bliver rød, er det tid til at skifte batteri.

Batteriopladning

Skal batteriet i skopet oplades fjernes dækslet på håndtaget, og batteriet ombyttes med det opladte batteri fra den eksterne oplader. Når det brugte batteri isættes opladeren, vil opladeren indikere status på batteriet i mA (milliampere) og vil indikere med teksten 'Full' ved fuldt opladt batteri. I opladeren er det muligt at oplade to batterier samtidigt. Når batteriet er fuldt opladt slår opladeren fra, så batteriet ikke overoplades.

Påsætning af det sterile engangsblad

Engangsbladene er perfekt formstøbte efter størrelse og kurve på skopet. Det påsættes nemt ved at føre bladet på kamerasticken og føre det op mod håndtaget med et let tryk, indtil der høres et lille klik. Bladet sidder nu sikkert fast på videolaryngoskopets håndtag.

Rengøring

Det anbefales at bruge klude med 75% ethanol eller Tristel til rengøring af secMAC+. secMAC+ er stænktæt; håndtaget er IPX7 (batteriet fjernes først) og skærmen er IPX4. Ved anvendelse til isolationspatienter kan klorklude anbefales. secMAC+ må ikke autoklaveres.

Forbind til computer

Dataoverførsel til PC

Tænd skopet for at kunne overføre data. Forbind secMAC+ til en computer via det medfølgende kabel. Kablet tilsluttes skopet via micro USB-stikket i bunden af skærmen. På computeren vælges "Denne computer" hvorefter "Flytbar disk" vælges. Der dobbeltklikkes på "Flytbar disk" for at se de billeder og/eller videosekvenser, der er gemt på secMAC+.

Indstilling af tid og dato

Forbind secMAC+ til computeren som anført ovenfor. Dato og tid indstilles ved at trykke i 3 sekunder på knappen på secMAC+, indtil det er tændt. Bemærk at skærmen vil være mørk, lyset i skopet vil slukke og displayet vil vise et logo med teksten 'Connecting'.

Opret en ny fil "TXT"; skift filnavn til "RTC"; indtast herefter dato og tid i filen som eksemplvis følgende: 20200422152201, hvilket betyder: år= 2020, måned= 04 (april), dag= 22, time= 15 (24 timer), minut = 22 og sekunder =01.

Gem filen med det samme og fjern kablet. Tænd evt. secMAC+ på ny, for at sikre at dato og tid nu er indstillet korrekt.

